


# Ref. GANOPATIENT

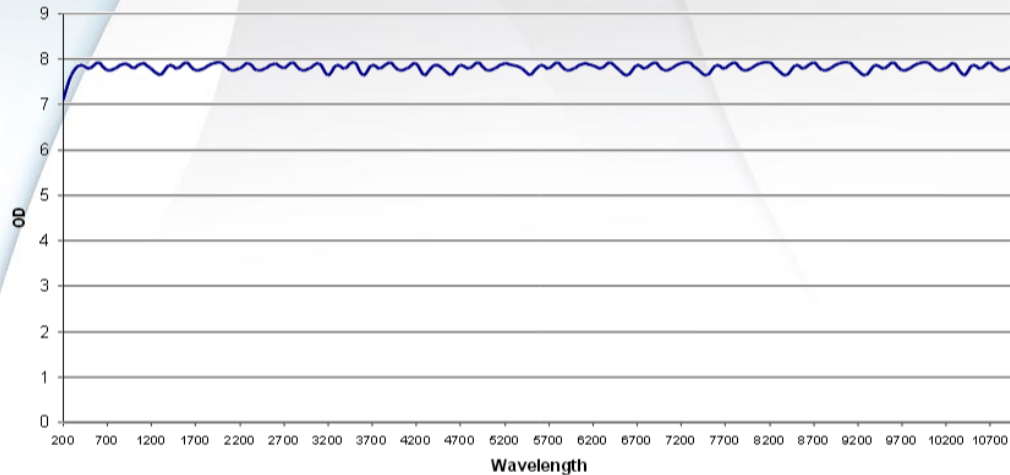

## CE-EN207 L-Rating

DR 180-315 LB9 + LB3

DIR>315-1400 LB6 + LB7 + LB7

DI>1400-10600 LB4



## Instrucciones:

-Examine las gafas de protección láser e IPL para ver si tienen posibles puntos visibles en la zona de los ojos por los cuales pueda penetrar la luz. Hacemos hincapié en que los óculos dañados pueden reducir considerablemente o incluso eliminar la protección que ofrecen unas gafas protectoras en perfecto estado.

-No reforme ni modifique estas gafas.

-El puente nasal lo podrá ajustar acercando o apartando mutuamente los ojos. Varíe el ajuste encajando cada vez en una muesca hasta que las gafas queden bien ajustadas.

-Para que las gafas correctamente colocadas queden bien ajustadas, las correas de seguridad tendrán que estar amarradas, pero no demasiado tensas. Para evitar una penetración de luz por los bordes exteriores de las gafas, los ojos deberán tener un perfecto contacto con la piel.

-Guarde el producto en su caja cuando no se use.

-Cuidado y limpieza: Recomendamos soluciones detergentes a base de agua para todas las piezas.

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208



e-mail: [info@ibsalaser.es](mailto:info@ibsalaser.es) Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

[www.ibsalaser.es](http://www.ibsalaser.es)