


Ref. **GANOPATIENT-P**

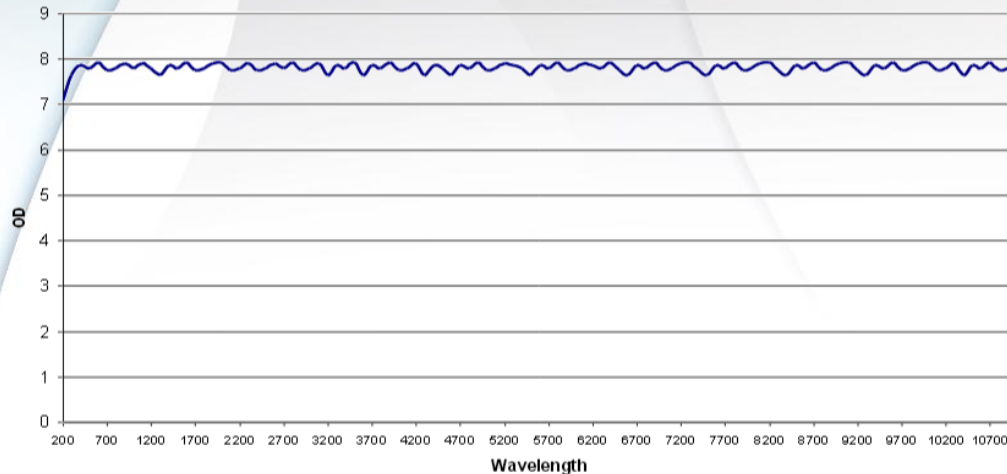

CE-EN207 L-Rating

190-315 D LB8 + IR LB4

>315 1400 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y

>1400-11000 DI LB3

Material: Nylon reforzado



Instrucciones:

-Examine las gafas de protección láser e IPL para ver si tienen posibles puntos visibles en la zona de los óculos por los cuales pueda penetrar la luz. Hacemos hincapié en que los óculos dañados pueden reducir considerablemente o incluso eliminar la protección que ofrecen unas gafas protectoras en perfecto estado.

-No reforme ni modifique estas gafas.

-El puente nasal lo podrá ajustar acercando o apartando mutuamente los óculos. Varíe el ajuste encajando cada vez en una muesca hasta que las gafas queden bien ajustadas.

-Para que las gafas correctamente colocadas queden bien ajustadas, las correas de seguridad tendrán que estar amarradas, pero no demasiado tensas. Para evitar una penetración de luz por los bordes exteriores de las gafas, los óculos deberán tener un perfecto contacto con la piel.

-Guarde el producto en su caja cuando no se use.

-Cuidado y limpieza: Recomendamos soluciones detergentes a base de agua para todas las piezas.

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208



e-mail: info@ibsalaser.es Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

www.ibsalaser.es